



TelePatch™
Sistema de
monitoreo



El sistema de monitoreo
cardíaco ambulatorio más
avanzado y práctico

Esta página se dejó en blanco intencionalmente.

Índice

Bienvenido a TelePatch	2
Contenido del kit de monitoreo TelePatch....	3
Preparación de la piel.....	4
Colocación del dispositivo	5
Comienzo del estudio	6
Guía de luz y sonido.....	8
Reemplazo del parche de electrodos.....	9
Cambio y carga de la batería	10
Registro de síntomas	11
Qué hacer y qué no hacer	12
Conexión del monitor a una red wi-fi.....	13
Resolución de problemas.....	14
Para finalizar el procedimiento	16
Devolución del kit de monitoreo	Contraportada



Para ver el Aviso de Prácticas de Privacidad de ReactDx, los Derechos y Responsabilidades del Paciente y la Asignación de Beneficios/Consentimiento del Paciente, visite www.ReactDx.com/Notices. Si desea una copia impresa, por favor llame al (877) 996-5553.

Bienvenido a TelePatch

El sistema de monitoreo cardíaco más avanzado

Su doctor le ha indicado un estudio de monitoreo cardíaco ambulatorio para el cual usará el Monitor TelePatch de ReactDx.

Esta guía le explicará cómo conectar el monitor, cómo usarlo durante sus actividades cotidianas, cómo registrar los síntomas cuando ocurran y cómo devolverlo al finalizar el estudio. Este estudio registrará la actividad eléctrica de su corazón y le ayudará a su doctor a encontrar irregularidades cardíacas, denominadas “arritmias”.

Los registros de ECG se envían a ReactDx, donde técnicos cardíacos certificados y altamente capacitados analizan los datos del ECG y generan informes para su doctor. Debe colocarse el monitor y realizar sus actividades diarias con normalidad; incluso puede ducharse con el dispositivo. Si en algún momento percibe algún síntoma o latido irregular del corazón, simplemente presione la tecla “Symptom” (síntoma). Es un proceso simple y no debe interferir en sus actividades diarias.

Comience a usar el monitor de inmediato; deberá llevarlo puesto las 24 horas del día durante el plazo que dure el estudio que se le ha indicado. Las instrucciones incluidas en esta Guía para el paciente le explicarán cómo usar el monitor. Al finalizar el estudio, quítese el dispositivo y siga las instrucciones para devolverlo sin demora.

Si tiene alguna pregunta luego de leer esta guía, contáctese con ReactDx al 877-996-5553.


Contenido del kit de monitoreo TelePatch




Dispositivo móvil



Unidad de control universal

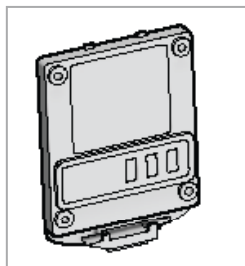

Batería(s)

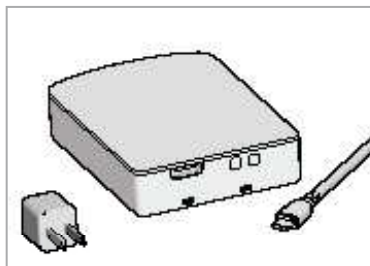

Cargador de la batería,
cable de carga y enchufe



Parche(s) de electrodos

Preparación de la piel



1 Encuentre la ubicación.



2 Lave la zona con jabón común (sin loción/aceite), rasure y seque.



3 Limpie la zona con el paño de preparación.



4 Deje secar 60 segundos.

! El parche debe ubicarse a la izquierda del centro del tórax, como se indica. Todos los materiales utilizados son libres de látex. Si sabe que tiene sensibilidad cutánea, contáctese con su médico.

Colocación del dispositivo



5 Inserte la batería.



6 Inserte la unidad de control. Inserte la parte superior de la unidad de control, luego presione hacia abajo en la parte inferior.



7 Retire el papel transparente.



8 Adhiera al tórax.




9 Retire el anillo exterior blanco.



No mueva el parche hacia la zona del hombro

! Alinee el parche justo a la izquierda del centro de su pecho. Evite el pliegue de su hombro.

Comienzo del estudio

 Luz intermitente

Siga estos pasos después de colocar el parche de electrodo esté adherido al tórax en la posición correcta.



1 Confirme que la unidad de control esté encendida. Si no es así, presione el botón de **ON** para encenderla.




2 La luz verde parpadea cada 4 segundos.

! Confirme que la luz verde parpadee lentamente. La luz verde indica que la unidad de control está encendida y realizando el monitoreo, pero no se comunica con el dispositivo móvil. La unidad de control se comunica con el dispositivo móvil cuando este está encendido y se encuentra cerca (6-10 pies) de la unidad de control.




3 Encienda el dispositivo presionando la tecla de encendido. Toque 'Start Procedure.'

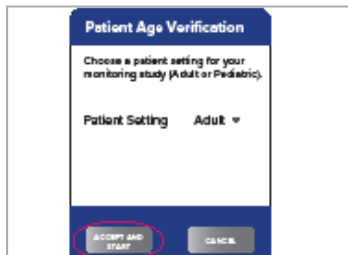

4 Seleccione adulto o pediátrico para el entorno del paciente. Toque 'Accept and Start.'



5 Seleccione la dirección MAC de tu unidad de control que se encuentra en la etiqueta en el lateral de tu caja. Toque 'Confirm'.

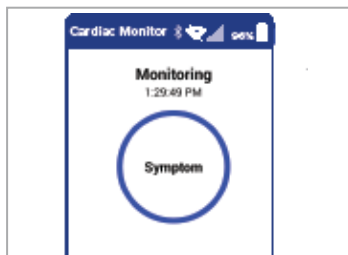

6 Su procedimiento se está ejecutando cuando aparece el botón "Symptom".

! Una vez que el dispositivo móvil se haya encendido y conectado a la unidad de control, la luz AZUL de la unidad de control parpadeará lentamente, lo cual indica que la unidad de control está realizando el monitoreo y está comunicada con el dispositivo móvil de forma correcta.

Guía de luz y sonido

Luz intermitente



Encendido



Apagado



Monitoreando: Bien



Activación del botón "Symptom"



Verifique la unidad de control



Cambie la batería

AZUL

Luz intermitente

Monitoreando correctamente y hay comunicación con el dispositivo móvil.

VERDE

Luz intermitente

Monitoreando correctamente, pero no hay comunicación con el dispositivo móvil.

NARANJA

Luz intermitente

Cambie la batería.

Reemplazo del parche de electrodos



1 Quite el parche.



2 Quite la unidad de control.



3 Descarte solo el parche.



4 Limpie la zona con el paño de preparación




5 Inserte la unidad de control.



6 Colóquelo en el pecho y asegúrese de que la unidad de control esté encendido.

- !** Los suministros que contiene su kit deberían durar hasta el final del estudio. Por favor siga con atención las instrucciones para aplicar el Parche adecuadamente. Sí tiene alguna pregunta contacte a Soporte al Paciente al **(877) 996-5553**.

Cambio y carga de la batería

 Luz intermitente



Batería cargada y monitoreando.



Batería baja.



1 Apague el aparato.



2 Extraiga la batería de la unidad.




3 Coloque la batería en la unidad.




4 Inserte la unidad. Asegúrese de que esté encendida.



5 Coloque la batería en el cargador.

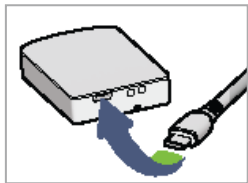


6 Conecte el cable al cargador y a un tomacorriente.

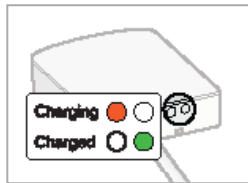

7 Verifique las luces.


Registro de síntomas

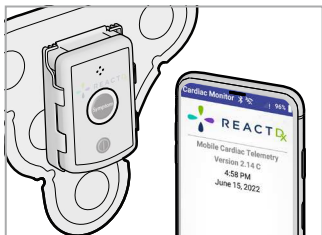


1 Cuando perciba un síntoma, presione el botón “Symptom” en la unidad o en el dispositivo móvil.



2 Presione la opción “Manual” o “Audio” para registrar los datos del síntoma.

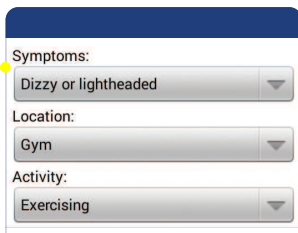


Toque la opción “Manual” y, de los tres menús desplegables, seleccione sus síntomas, ubicación y actividad. Para terminar presione “Save”.

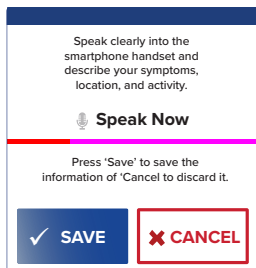

Toque la opción “Audio” y hable con claridad al micrófono del dispositivo móvil y describa sus síntomas, ubicación y actividad. Toque la opción “Done”.

! Recuerde: cada vez que perciba un **síntoma**, presione el botón “Symptom” que se encuentra en la **unidad de control** o el **dispositivo móvil**, y registre qué sentía y qué estaba haciendo.

Qué hacer y qué no hacer

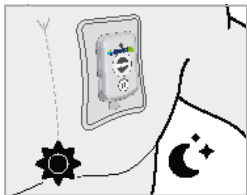


Utilice en el día y la noche.



Inserte totalmente en el soporte.



No descarte la unidad de control.

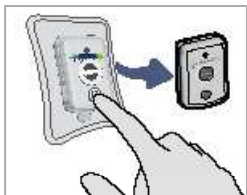

Apáguelo antes de cambiar la batería.



Seque la unidad de control y el parche.



No lo sumerja.



Mantenga el dispositivo móvil cerca.



Devuélvalo sin demora: deje el Kit en cualquier buzón de USPS para que el cartero lo recoja.




No mueva el parche hacia la zona del hombro.

Conexión del monitor a una red wi-fi



1 Toque el símbolo wi-fi en la parte superior de la pantalla de inicio.

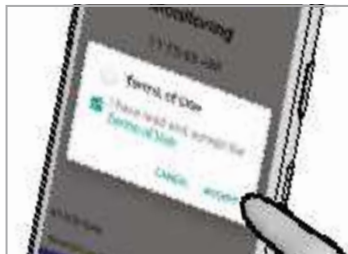

2 Lea y acepte los términos de uso.



3 Seleccione su red.




4 Ingrese su contraseña, presione 'Enter' y verifique su conexión.

! Su monitor cardíaco se conectará automáticamente a una red celular. Sin embargo, si elige conectar su monitor a una red wi-fi, eso ayudará a que los datos recopilados se transmitan con rapidez a nuestros centros de monitoreo cardíaco.

Resolución de problemas


Los mensajes de texto con un ícono amarillo de precaución en el teléfono son mensajes de acción que requieren tu atención. Sigue estas simples instrucciones para volver a la monitorización completa.

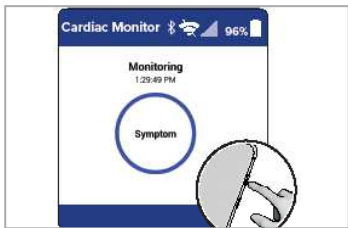


1 Mantenga presionado el botón de encendido.



2 Toque 'Power Off.'

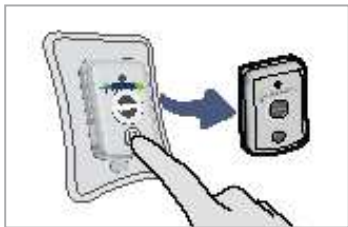


3 Apague y retire la unidad de control.

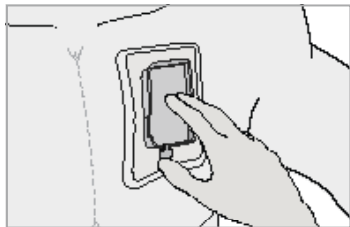

4 Limpie en el interior las conexiones de la base y las clavijas de conexión de la unidad.


! Este proceso resuelve los problemas más comunes. Si, al realizar este proceso, su problema no se resuelve, visite www.ReactDx.com/troubleshooting.

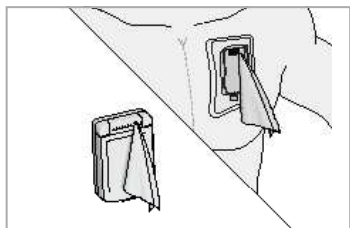


- 5** Asegúrese que el parche esté asegurado al pecho presionando el interior de la base.



- 7** Inserte la unidad de control y encienda.

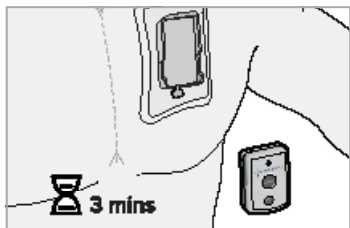

- 6** Espere 3 minutos.

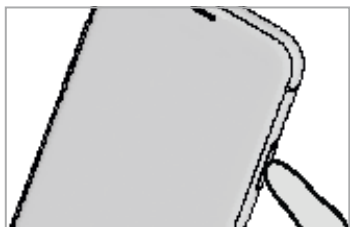

- 8** Encienda el dispositivo móvil.

- !** Si no puede resolver un problema y necesita ayuda en el caso de que aparezcan otros mensajes en carteles amarillos, llame a
- **ReactDx al (877) 996-5553** o chatee con nosotros en línea en www.ReactDx.com.

Para finalizar el procedimiento




1 Quítese del tórax el parche con la unidad.




2 Extraiga la unidad de control.




3 Descarte solamente el parche.

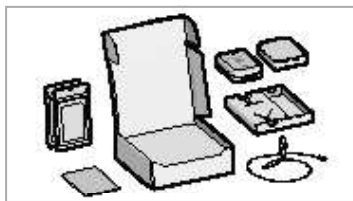

4 Coloque nuevamente en la caja todos los contenidos / suministros sin usar.

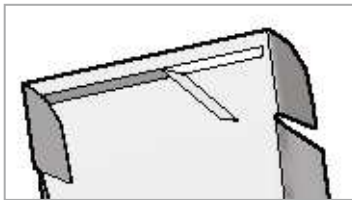

5 Cierre y selle la caja.

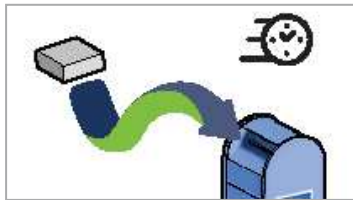

6 Déjela de inmediato en cualquier buzón de USPS.

Esta página se dejó en blanco intencionalmente.

Devolución del kit de monitoreo

Devuelva el kit de inmediato de manera que su doctor pueda finalizar su estudio. Los dispositivos no devueltos podrían retrasar la entrega a su doctor, generar una factura por los equipos no devueltos, y demorar la ayuda a los pacientes siguientes.



Deje el kit sellado en cualquier buzón de USPS.



Por favor, tómese un momento para completar la encuesta en [ReactDx.com/survey/](https://reactdx.com/survey/). Sus comentarios nos ayudarán a brindarles a pacientes como usted la mejor experiencia posible.

Recuerda devolver el kit inmediatamente después de que se complete el procedimiento para ayudar a que tu médico finalice tu prueba. Los dispositivos no devueltos pueden generar una factura de hasta \$2000 para reemplazar el dispositivo.



Medicomp, Inc.
dba ReactDx has earned
the Joint Commission's
Gold Seal of Approval.



(877) 996-5553 • www.ReactDx.com • Info@ReactDx.com

SGS000726-02