



## TelePatch™

Sistema de monitoreo  
TelePatch Guía para el  
paciente de Holter



El sistema de monitoreo  
cardíaco ambulatorio más  
avanzado y práctico

Esta página se dejó en blanco intencionalmente.

# Índice

---

Bienvenido a TelePatch .....	2
Contenido del kit de monitoreo TelePatch....	3
Preparación de la piel.....	4
Colocación del dispositivo .....	5
Comienzo del estudio .....	6
Guía de luz y sonido.....	7
Reemplazo del parche de electrodos.....	8
Cambio de la batería.....	9
Resolución de problemas.....	10
Qué hacer y qué no hacer .....	11
Registro de síntomas .....	12
Para finalizar el procedimiento .....	13
Devolución del kit de monitoreo .....	Contraportada



Para ver el aviso de Prácticas de Privacidad de ReactDx, los Derechos y Responsabilidades del Paciente y la Asignación de Beneficios/Consentimiento del Paciente, visite [www.ReactDx.com/Notices](http://www.ReactDx.com/Notices). Si desea una copia impresa, por favor llame al (877) 996-5553.

# Bienvenido a TelePatch

---

## El sistema de monitoreo cardíaco más avanzado

Su doctor le ha indicado un estudio de monitoreo cardíaco ambulatorio para el cual usará el Monitor TelePatch de ReactDx.

Esta guía le explicará cómo conectar el monitor, cómo usarlo durante sus actividades cotidianas, cómo registrar los síntomas cuando ocurran y cómo devolverlo al finalizar el estudio. Este estudio registrará la actividad eléctrica de su corazón y le ayudará a su doctor a encontrar irregularidades cardíacas, denominadas “arritmias”.

Los registros de ECG se envían a ReactDx, donde técnicos cardíacos certificados y altamente capacitados analizan los datos del ECG y generan informes para su doctor. Debe colocarse el monitor y realizar sus actividades diarias con normalidad; incluso puede ducharse con el dispositivo. Si en algún momento percibe algún síntoma o latido irregular del corazón, simplemente presione la tecla “Symptom” (síntoma). Es un proceso simple y no debe interferir en sus actividades diarias.

Comience a usar el monitor de inmediato; deberá llevarlo puesto las 24 horas del día durante el plazo que dure el estudio que se le ha indicado. Las instrucciones incluidas en esta Guía para el paciente le explicarán cómo usar el monitor. Al finalizar el estudio, quítese el dispositivo y siga las instrucciones para devolverlo sin demora.


**Si tiene alguna pregunta luego de leer esta guía, contáctese con ReactDx al 877-996-5553.**

# Contenido del kit

---



Unidad de control universal

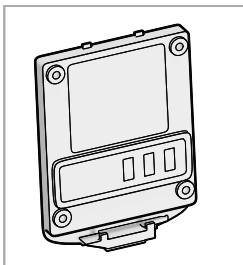

Batería(s)




Parche(s) de electrodos


- ! Nota: La cantidad de parches y baterías incluidas en su kit es dependiendo de la duración prescrita de su estudio Holter.
- También puede incluirse un Diario para el Paciente.

# Preparación de la piel


---

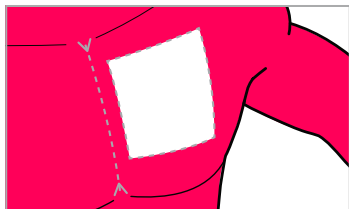


**1** Encuentre la ubicación.

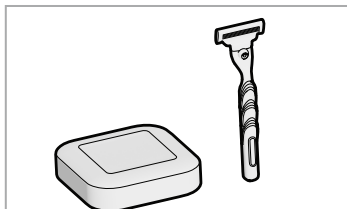

**2** Lave la zona con jabón común (sin loción/aceite), rasure y seque.

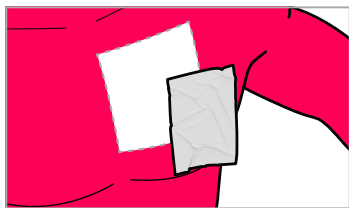


**3** Limpie la zona con el paño de preparación.

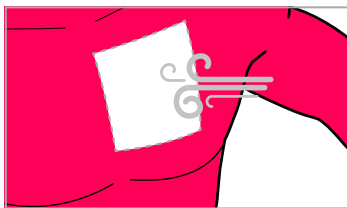

**4** Deje secar 60 segundos.

**!** El parche debe ubicarse a la izquierda del centro del tórax, como se indica. Todos los materiales utilizados son libres de látex. Si sabe que tiene sensibilidad cutánea, contáctese con su médico.


## Colocación del dispositivo

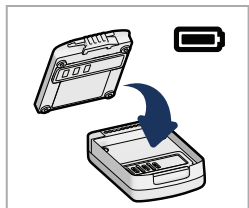


**5** Inserte la batería.




**6** Inserte la unidad de control. Inserte la parte superior del colgante, luego presione hacia abajo en la parte inferior.

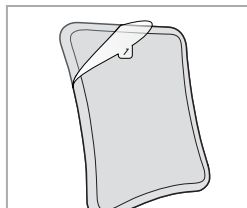


**7** Retire el papel transparente.

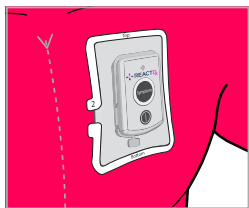

**8** Adhiera al tórax.

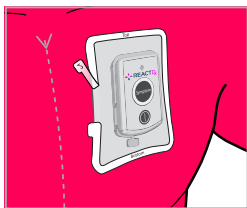

**9** Retire el anillo exterior blanco.

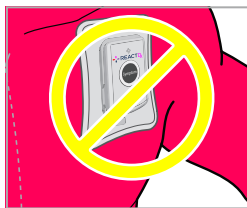

No mueva el parche hacia la zona del hombro.


**!** Alinee el parche justo a la izquierda del centro de su pecho. Evite el pliegue de su hombro.

# Comienzo del estudio




Luz intermitente

Siga estos pasos después de colocar el parche de electrodo esté adherido al tórax en la posición correcta.

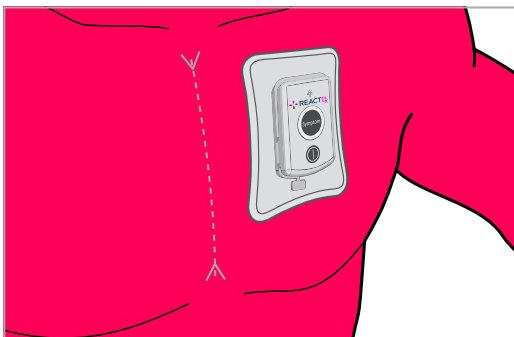

**1** Confirme que la unidad de control esté encendida. Si no es así, presione el botón de encendido para encenderla.

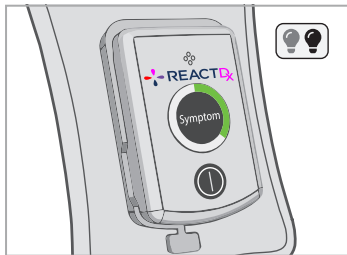


**2** La luz verde parpadea cada 4 segundos.


**!** Confirme que la luz verde parpadee lentamente. La luz verde indica que la unidad de control está encendida y realizando el monitoreo, pero no se comunica con el dispositivo móvil. La unidad de control se comunica con el dispositivo móvil cuando este está encendido y se encuentra cerca (6-10 pies) de la unidad de control.

# Guía de luz y sonido

## Luz intermitente

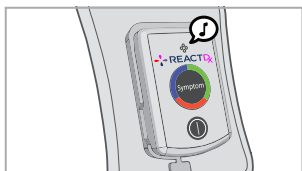

Encendido

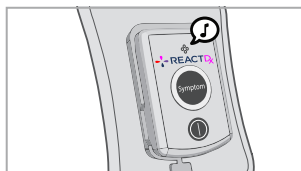

Apagado




Monitoreando: Bien



Activación del botón  
“Symptom”



Verifique unidad de control

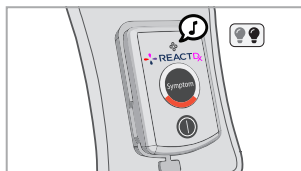


Cambie la batería

- ! Sí la luz AZUL de verifique la unidad de control parpadea, saque la unidad de control, limpie la unidad de control y el interior del soporte con un paño seco, y vuelva a insertar la unidad de control.


# Reemplazo del parche de electrodos




**1** Quite el parche.

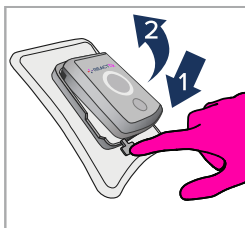

**2** Quite la unidad de control.

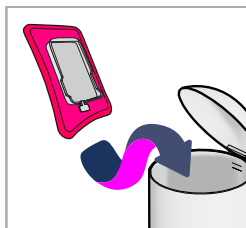


**3** Descarte solo el parche.

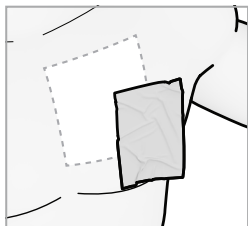

**4** Limpie la zona con el paño de preparación




**5** Inserte la unidad de control.

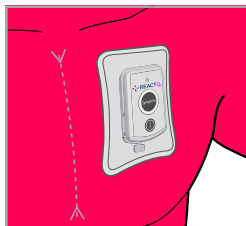

**6** Colóquelo en el pecho y asegúrese de que la unidad de control esté encendida.


- !** Los suministros que contiene su kit deberían durar hasta el final del estudio. Por favor siga con atención las instrucciones para aplicar el Parche adecuadamente. Sí tiene alguna pregunta contacte a Soporte al Paciente al **(877) 996-5553**.

# Cambio de la batería

 Luz Intermitente




Batería cargada y monitoreando.

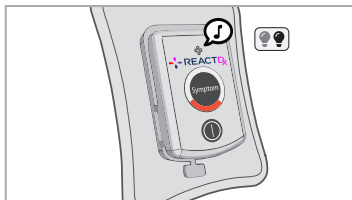


Batería baja.



**1** Apague el aparato.

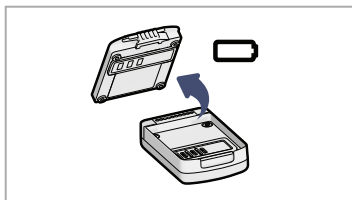

**2** Extraiga la batería de la unidad.

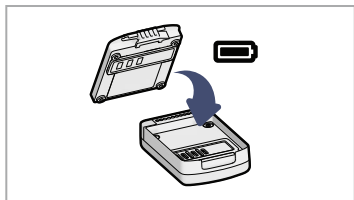

**3** Coloque la batería en la unidad.




**4** Inserte la unidad. Asegúrese de que esté encendida.

# Resolución de problemas


A veces se puede acumular humedad dentro del patch cradle, especialmente si se ha duchado con la unidad de control puesta. Siga estos pasos si su unidad de control parpadea en azul, lo que indica que es necesario revisarla.




Si la luz azul del de la unidad de control parpadea, siga estos pasos.

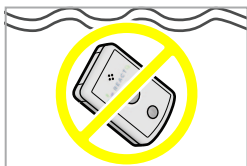


No lo sumerja.

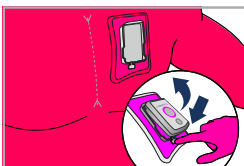


**1** Quite la unidad de control.

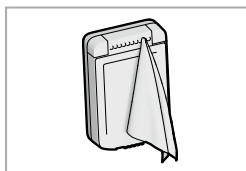


**2** Use una toallita con alcohol para limpiar los electrodos de oro en la espalda.

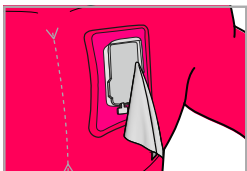

**3** Limpie el interior de la base con un paño con alcohol.

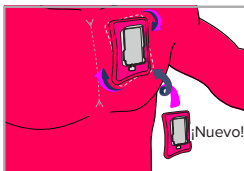


**4** Si el parche está flojo, reemplácelo.

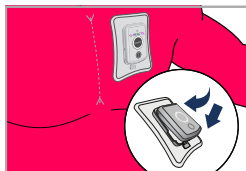

**5** Inserte la Unidad de control y asegúrese de que esté **ENCENDIDA**.

**!** La unidad de control es resistente al agua, pero no impermeable. Puede ducharse con la unidad de control puesta, pero no la sumerja.


# Qué hacer y qué no hacer

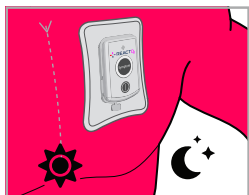


Utilice en el día y la noche.




Inserte totalmente en la base.

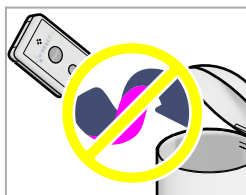


No descarte la unidad de control.

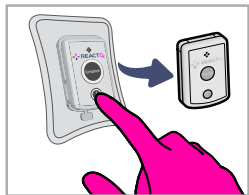


Apáguelo antes de cambiar la batería.

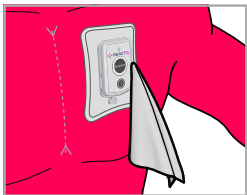


Seque la unidad de control y el parche.

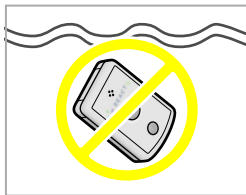

No lo sumerja.

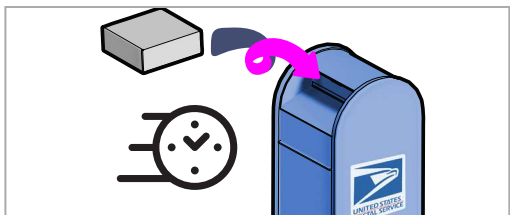


**Devuélvalo sin demora:** deje el kit en cualquier buzón de USPS para que el cartero lo recoja.

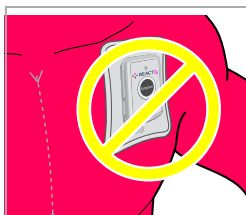


No mueva el parche hacia la zona del hombro.

# Registro de síntomas

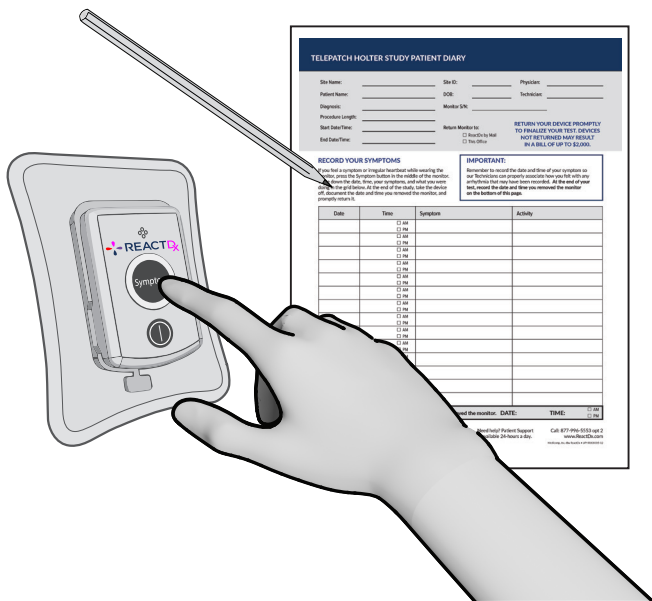


**Recuerde:** Cada vez que perciba un síntoma, **presione el botón “Symptom”** que se encuentra en la unidad de control. **Registre la fecha, la hora, lo que estaba haciendo y lo que sintió** para cada síntoma experimentado en el **diario del paciente** o en una hoja de papel que incluya su nombre y fecha de nacimiento. Devuelva sus notas en el kit inmediatamente después de que se complete el estudio.

## Para finalizar el procedimiento

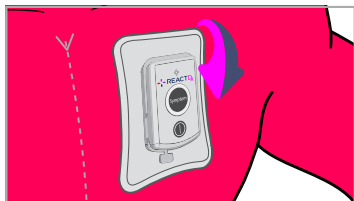


**1** Quítese del tórax el parche con la unidad.

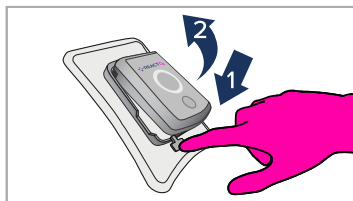


**2** Extraiga la unidad de control.




**3** Descarte solamente el parche.

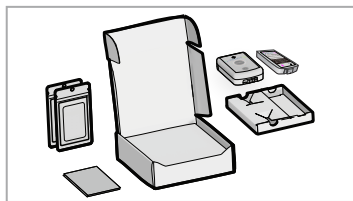

**4** Coloque nuevamente en la caja todos los contenidos / suministros sin usar.

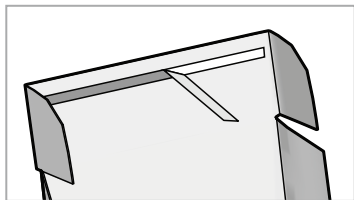


**5** Cierre y selle la caja.

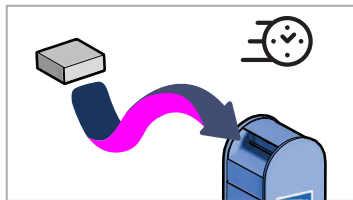

**6** Déjela de inmediato en cualquier buzón de USPS.

# Devolución del kit de monitoreo

Devuelva el kit de inmediato de manera que su doctor pueda finalizar su estudio. Los dispositivos no devueltos podrían retrasar la entrega a su doctor, generar una factura por los equipos no devueltos, y demorar la ayuda a los pacientes siguientes.

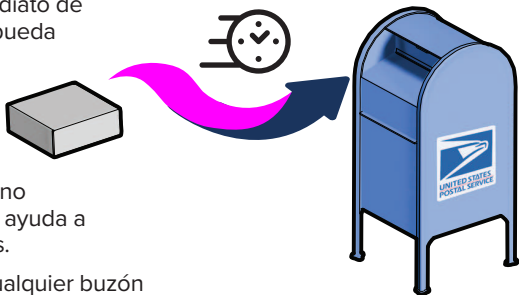

Deje el kit sellado en cualquier buzón de USPS.



Por favor, tómese un momento para completar la encuesta en [ReactDx.com/survey/](https://www.ReactDx.com/survey/). Sus comentarios nos ayudarán a brindarles a pacientes como usted la mejor experiencia posible.

**Su prueba Holter no se puede completar hasta que el kit esté regresó. Recuerda devolver el kit inmediatamente una vez finalizado el procedimiento. Dispositivos no devueltos puede resultar en una factura de hasta \$2000 para reemplazar el dispositivo.**



Medicomp, Inc.  
dba ReactDx has earned  
the Joint Commission's  
Gold Seal of Approval.



(877) 996-5553 • [www.ReactDx.com](http://www.ReactDx.com) • [Info@ReactDx.com](mailto:Info@ReactDx.com)

©2024 Medicomp, Inc. dba ReactDx

QSGS000727-02