



TelePatch™

Unidad de control universal con
cable para el paciente

El sistema de monitoreo cardíaco
ambulatorio más avanzado y práctico



Aviso de prácticas de privacidad



Para ver el Aviso de Prácticas de Privacidad de ReactDx, los Derechos y Responsabilidades del Paciente y la Asignación de Beneficios/Consentimiento del Paciente, visite www.ReactDx.com/Notices.

Si desea una copia impresa, por favor llame al (877) 996-5553.

Índice

Bienvenido a TelePatch	2
Contenido del kit de monitoreo TelePatch.....	3
Preparación de la piel.....	4
Colocación de los parches de electrodos.....	4-5
Ensamblado de la unidad de control y el soporte para cable	6
Registro de síntomas	7
Guía de luz y sonido.....	8
Cambio de los electrodos.	9
Cambio y carga de la batería	10
Qué hacer y qué no hacer	11
Resolución de problemas.....	12
Para finalizar el procedimiento	13
Devolución del kit de monitoreo	Contraportada

Bienvenido a TelePatch

El sistema de monitoreo cardíaco más avanzado

Su doctor le ha indicado un estudio de monitoreo cardíaco ambulatorio para el cual usará el monitor TelePatch de ReactDx.

Esta guía le explicará cómo conectar el monitor, cómo usarlo durante sus actividades cotidianas, cómo registrar los síntomas cuando ocurran y cómo devolverlo al finalizar el estudio. Este estudio registrará la actividad eléctrica de su corazón y le ayudará a su doctor a encontrar irregularidades cardíacas, denominadas “arritmias”.

Los registros de ECG se envían a ReactDx, donde técnicos cardíacos certificados y altamente capacitados analizan los datos del ECG y generan informes para su doctor. Debe colocarse el monitor y realizar sus actividades diarias con normalidad; incluso puede ducharse con el dispositivo. Si en algún momento percibe algún síntoma o latido irregular del corazón, simplemente presione la tecla “Symptom” (síntoma). Es un proceso simple y no debe interferir en sus actividades diarias.


Comience a usar el monitor de inmediato; deberá llevarlo puesto las 24 horas del día durante el plazo que dure el estudio que se le ha indicado. Las instrucciones incluidas en esta guía para el paciente le explicarán cómo usar el monitor. Al finalizar el estudio, quítese el dispositivo y siga las instrucciones para devolverlo sin demora.

Si tiene alguna pregunta luego de leer esta guía, contáctese con ReactDx al 877-996-5553.


Contenido del kit de monitoreo TelePatch




Unidad de control universal

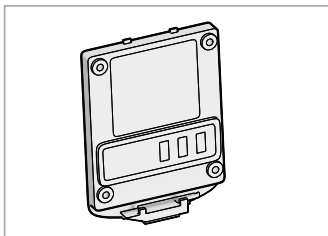

Batería(s)

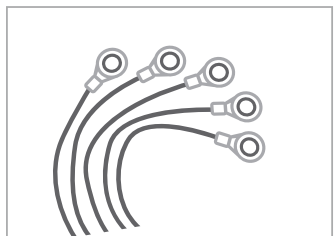

Cable de paciente de 5 derivaciones

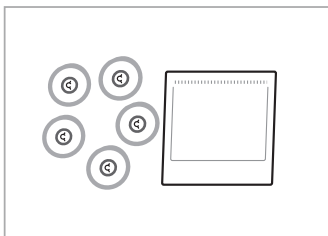

Paquete de electrodos



Soporte para cable



Acollador

Preparación de la piel

Utilizando como guía las ilustraciones de la derecha, elige zonas del pecho que sean planas y poco musculosas. Evite los pliegues o arrugas de la piel, la piel irritada y las cicatrices.




▶ **Lave la zona con jabón común** (sin loción/aceite), **rasure y seque.**



▶ **Limpie la zona con el paño de preparación.**

▶ **Deje secar 60 segundos.**

Colocación de los parches de electrodos

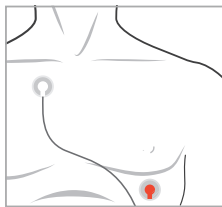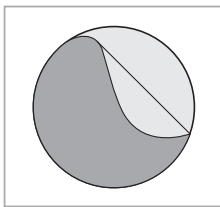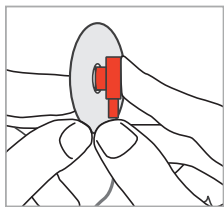

1 Abra un paquete de electrodos. Ajuste los electrodos en todas las terminales de color del cable del paciente



2 Luego, uno por uno, despegue la cubierta del dorso de cada electrodo y colóqueselos en el tórax utilizando la ubicación que se muestra en las ilustraciones de la derecha. Tenga en cuenta dónde debe colocarse cada terminal de color.

! Cambie los parches de electrodos cada dos días. Cuando vuelva a colocarlos, desplace un poco su ubicación para disminuir la irritación cutánea.

Colocación de los parches de electrodos




Recuerde que, al mirarse en el espejo, los lados izquierdo y derecho se invertirán.

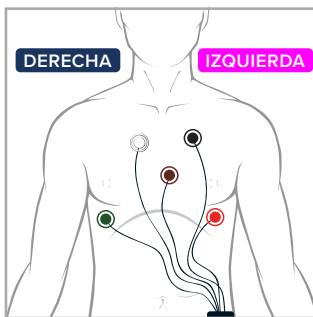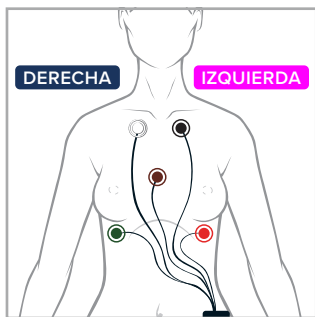

Consejo: Recuerde la frase que rima en inglés “white on right” (el blanco a la derecha) al colocar los electrodos. Esto lo ayudará a recordar que el electrodo blanco se coloca siempre en la parte superior derecha del tórax.


Ensamblado de la unidad de control y el soporte para cable

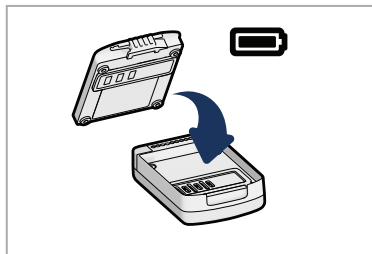

1 Inserte la batería.



2 Inserte la unidad de control.

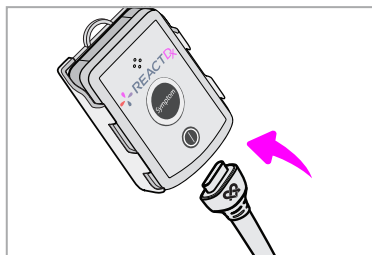

3 Conecte el cable del paciente insertando el enchufe plano en el puerto del cable en la base del soporte para cable.



4 La unidad de control debe iniciarse cuando se inserta una batería cargada, lo cual se indica con luces intermitentes y una señal de tres sonidos. Si no es así, presione el botón de encendido para encenderlo.

! Tenga cuidado de no colocar la unidad de control al revés. Asegúrese de que el extremo curvo de la unidad de control —el extremo inferior debajo del botón de encendido— esté pegado a la parte redondeada correspondiente del soporte.

Registro de síntomas

El estudio Holter comienza cuando se enciende la unidad de control y se inserta en el soporte para cable. Confirme que la luz VERDE esté parpadeando LENTAMENTE. Si la unidad de control muestra otras luces intermitentes o sonidos audibles, llame al servicio de atención al paciente de **ReactDx al (877) 996-5553 o chatee con nosotros en línea en www.ReactDx.com**.



! Recuerde: CUANDO experimente un síntoma, presione el botón Síntoma en la unidad de control y registre lo que sentían y hacían en el diario del paciente.

Guía de luz y sonido

Luz intermitente



Encendido




Apagado




Monitoreando: Bien



Activación del botón
“Symptom”

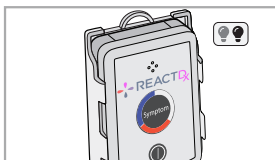

Verifique unidad de control

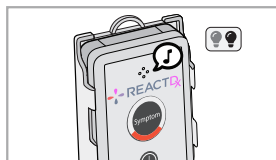

Cambie la batería

Si la luz **AZUL** comienza a parpadear, retire la unidad de control del soporte para cables, limpie la parte delantera y trasera de la unidad de control y el interior del soporte para cables con un paño limpio y seco. Inserte la unidad de control de forma segura.

Cambio de los electrodos



Cambie los electrodos cada dos días.

▶ Asegúrese de limpiar y preparar la piel antes de aplicar nuevos electrodos.



▶ Cuando vuelva a colocarlos, **desplace un poco su ubicación** en su tórax para reducir la irritación cutánea

▶ **Revise el diagrama de ubicación** (en la página 5) para colocar correctamente las terminales de colores del cable del paciente.

Al dormir


Coloque el soporte para cable con la unidad de control a su lado con los cables extendidos tanto como sea posible de manera que no se dé vuelta el monitor.



Use una prenda de dormir con un bolsillo a la altura del pecho y coloque el monitor en el bolsillo.

! **NO** use el cordón alrededor del cuello al dormir.

Cambio y carga de la batería

 Luz intermitente




Batería cargada y monitoreando.




Batería baja.



1 Apague el aparato.

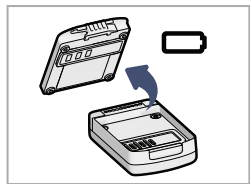


2 Extraiga la batería de la unidad.

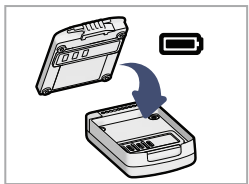


3 Coloque la batería en la unidad.




4 Inserte la unidad asegúrese de que esté encendida.

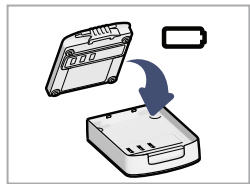

5 Coloque la batería en el cargador.

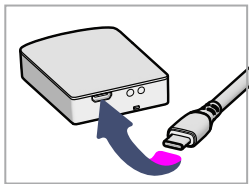

6 Conecte el cable al cargador y a un tomacorriente.

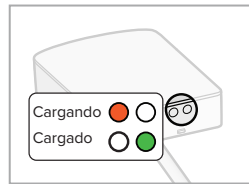

7 Verifique las luces.

Qué hacer y qué no hacer



Cambie los electrodos cada dos días.



Utilice en el día y la noche.


NO se duche, bañe ni nade con el dispositivo móvil, soporte para cable, unidad de control ni el cable del paciente, ni los humedezca de ninguna otra forma.




Insértelo completamente en el soporte para cable.



Lleve el soporte para cables en un cordón o en un bolsillo.

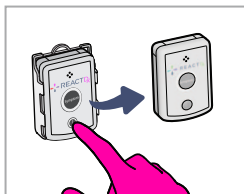

Apáguelo antes de cambiar la batería.

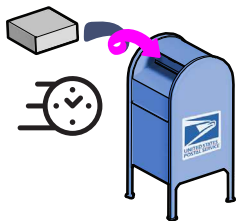


Devuélvalo sin demora: deje el kit en cualquier buzón de USPS para que el cartero lo recoja.


Resolución de problemas




Cambiar los electrodos cada dos días

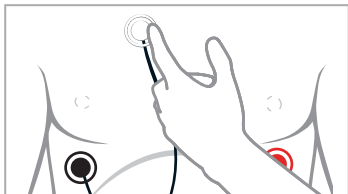


1 Asegúrese de que todos los electrodos estén bien colocados y que su colocación sea correcta.

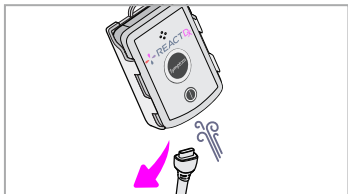

2 Desconecte el cable del soporte del cable y sople en el puerto.

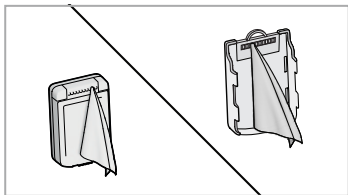


3 Limpie el interior de la base y el exterior de la unidad de control con una toallita con alcohol.

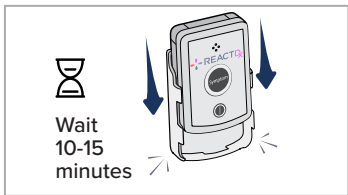


4 Vuelva a insertarlo y asegúrese de que la unidad de control haya regresado al modo de monitoreo.

! Si no puede resolver un problema o necesita ayuda con otros mensajes de error, **llame a ReactDx al (877) 996-5553 o chatee con nosotros en línea en www.ReactDx.com.**


Para finalizar el procedimiento

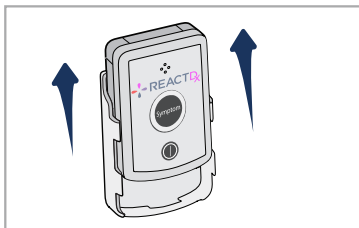


- 1** Retire la unidad de control de la base.

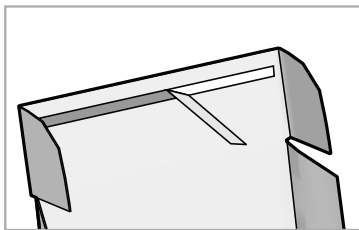

- 3** Vuelva a colocar todo el contenido o los suministros no utilizados en la caja. Cierre y selle la caja.

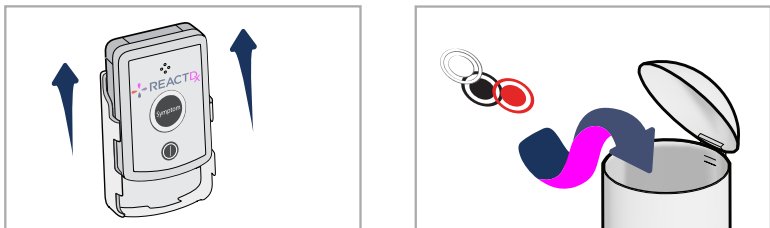

- 2** Desconecte el cable del paciente de los terminales y deseche los electrodos.

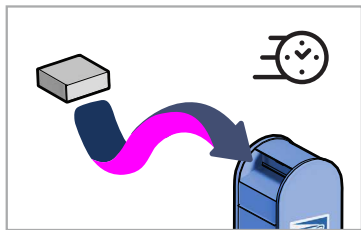


- 4** Déjelo inmediatamente al cartero en cualquier buzón de USPS.

Lista de embalaje del kit:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Unidad de control | <input type="checkbox"/> Cable de 5 derivaciones |
| <input type="checkbox"/> Baterías | <input type="checkbox"/> Electrodo sin usar |
| <input type="checkbox"/> Soporte para cable | <input type="checkbox"/> Acollador |

Devolución del kit de monitoreo

Devuelva el kit de inmediato de manera que su doctor pueda finalizar su estudio. Los dispositivos no devueltos podrían retrasar la entrega a su doctor, generar una factura por los equipos no devueltos, y demorar la ayuda a los pacientes siguientes.

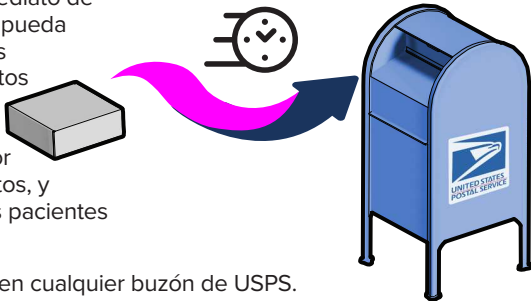

Déjelo para el cartero en cualquier buzón de USPS.



Por favor, tómese un momento para completar la encuesta en www.ReactDx.com/survey/. Sus comentarios nos ayudarán a brindarles a pacientes como usted la mejor experiencia posible.

La prueba Holter no se puede completar hasta que se devuelva el kit. Recuerde devolver el kit inmediatamente después de que se complete el procedimiento. Los dispositivos no devueltos pueden generar una factura de hasta \$2000 para reemplazar el dispositivo.



Medicomp, Inc. dba ReactDx
ha obtenido el Sello de
Aprobación Dorado de la
Joint Commission.



(877) 996-5553 • www.ReactDx.com • Info@ReactDx.com

©2024 Medicomp, Inc. dba ReactDx

QSGSPR0713-02