



## TelePatch™

Unidad de control universal  
con cable para el paciente

El sistema de monitoreo cardíaco  
ambulatorio más avanzado y práctico



# Aviso de prácticas de privacidad

---



Para ver el Aviso de Prácticas de Privacidad de ReactDx, los Derechos y Responsabilidades del Paciente y la Asignación de Beneficios/Consentimiento del Paciente, visite [www.ReactDx.com/Notices](http://www.ReactDx.com/Notices).

Si desea una copia impresa, por favor llame al (877) 996-5553.

# Índice

---

Bienvenido a TelePatch .....	2
Contenido del kit de monitoreo TelePatch.....	3
Preparación de la piel.....	4
Colocación de los parches de electrodos.....	4-5
Ensamblado de la unidad de control y el soporte para cable .....	6
Comienzo del estudio .....	7
Guía de luz y sonido.....	8
Cambio de los electrodos. ....	9
Cambio y carga de la batería .....	10
Registro de síntomas .....	11
Conexión del monitor a una red wi-fi.....	12
Qué hacer y qué no hacer .....	13
Resolución de problemas.....	14-15
Para finalizar el procedimiento .....	16-17
Devolución del kit de monitoreo .....	Contraportada

# Bienvenido a TelePatch

---

## El sistema de monitoreo cardíaco más avanzado

Su doctor le ha indicado un estudio de monitoreo cardíaco ambulatorio para el cual usará el Monitor TelePatch de ReactDx.

Esta guía le explicará cómo conectar el monitor, cómo usarlo durante sus actividades cotidianas, cómo registrar los síntomas cuando ocurran y cómo devolverlo al finalizar el estudio. Este estudio registrará la actividad eléctrica de su corazón y le ayudará a su doctor a encontrar irregularidades cardíacas, denominadas “arritmias”.


Los registros de ECG se envían a ReactDx, donde técnicos cardíacos certificados y altamente capacitados analizan los datos del ECG y generan informes para su doctor. Debe colocarse el monitor y realizar sus actividades diarias con normalidad; incluso puede ducharse con el dispositivo. Si en algún momento percibe algún síntoma o latido irregular del corazón, simplemente presione la tecla “Symptom” (síntoma). Es un proceso simple y no debe interferir en sus actividades diarias.

Comience a usar el monitor de inmediato; deberá llevarlo puesto las 24 horas del día durante el plazo que dure el estudio que se le ha indicado. Las instrucciones incluidas en esta Guía para el paciente le explicarán cómo usar el monitor. Al finalizar el estudio, quítese el dispositivo y siga las instrucciones para devolverlo sin demora.

**Si tiene alguna pregunta luego de leer esta guía,  
contáctese con ReactDx al 877-996-5553.**

# Contenido del kit de monitoreo TelePatch


---

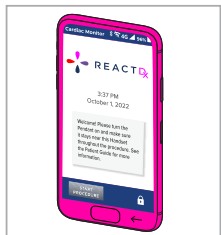


Dispositivo móvil




Unidad de control universal

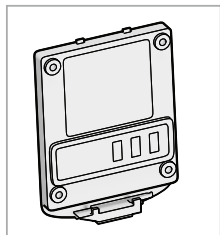

Batería(s)

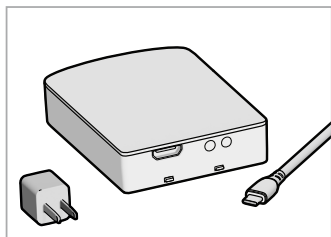


Cargador de la batería, cable de carga y enchufe

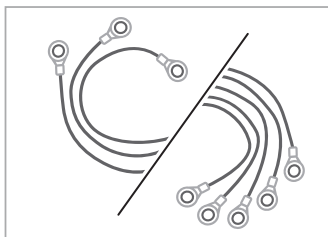


Cable del paciente, 3 o 5 derivaciones



Soporte para cable

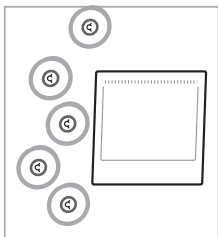

Paquete de electrodos

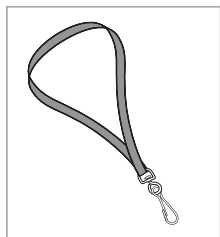

Acollador

# Preparación de la Piel

---

Utilizando como guía las ilustraciones de la derecha, elige zonas del pecho que sean planas y poco musculosas. Evite los pliegues o arrugas de la piel, la piel irritada y las cicatrices.

▶ **Lave la zona con jabón común** (sin loción/aceite), **rasure y seque.**






▶ **Limpie la zona con el paño de preparación.**

▶ **Deje secar 60 segundos.**

# Coloque los parches de electrodos

---

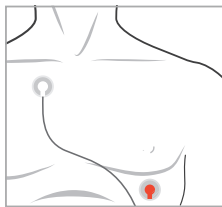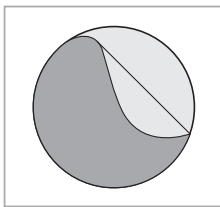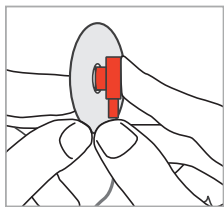

**1** Abra un paquete de electrodos. Ajuste los electrodos en todas las terminales de color del cable del paciente

**2** Luego, uno por uno, despegue la cubierta del dorso de cada electrodo y colóqueselos en el tórax utilizando la ubicación que se muestra en las ilustraciones de la derecha. Tenga en cuenta dónde debe colocarse cada terminal de color.

**!** Cambie los parches de electrodos cada dos días. Cuando vuelva a colocarlos, desplace un poco su ubicación para disminuir la irritación cutánea.



# Coloque los parches de electrodos





Recuerde que, al mirarse en el espejo, los lados izquierdo y derecho se invertirán.



Cable del paciente de 3 derivaciones

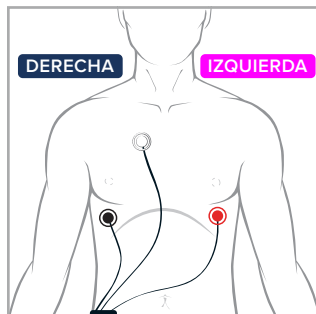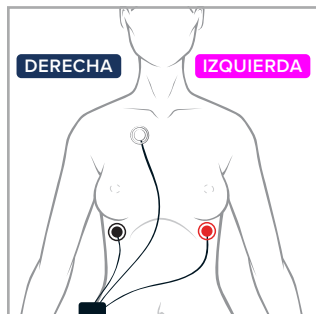


Cable del paciente de 5 derivaciones

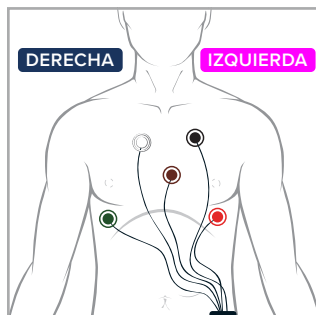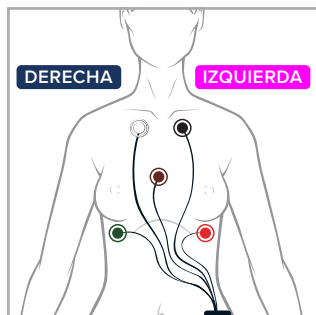

Consejo: Recuerde la frase que rima en inglés “white on right” (el blanco a la derecha) al colocar los electrodos. Esto lo ayudará a recordar que el electrodo blanco se coloca siempre en la parte superior derecha del tórax.


# Ensamble el colgante y la base

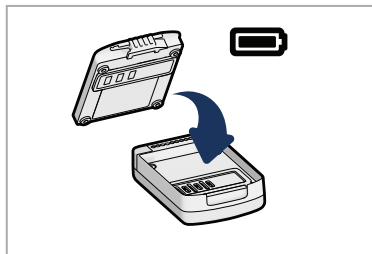

**1** Inserte la Batería.



**2** Inserte la Unidad de Control.

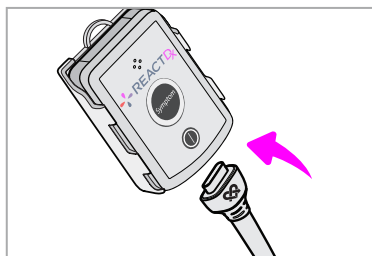


**3** Conecte el cable del paciente insertando el enchufe plano en el puerto del cable en la base del soporte para cable.



**4** La unidad de control debe iniciarse cuando se inserta una batería cargada, lo cual se indica con luces intermitentes y una señal de tres sonidos. Si no es así, presione el botón de encendido para encenderlo.

**!** Tenga cuidado de no colocar la unidad de control al revés. Asegúrese de que el extremo curvo de la unidad de control —el extremo inferior debajo del botón de encendido— esté pegado a la parte redondeada correspondiente del soporte.


# Comienzo del estudio

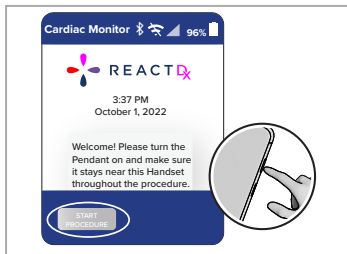


- 1 Encienda el dispositivo presionando la tecla de encendido. Toque **'Start Procedure.'**



- 2 Seleccione adulto o pediátrico para el entorno del paciente. Toque **'Accept and Start.'**

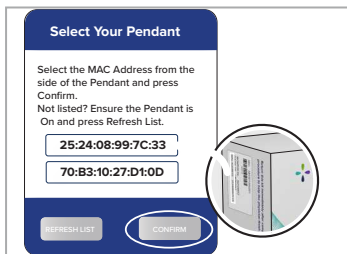

- 3 Seleccione la dirección MAC de tu unidad de control que se encuentra en la etiqueta en el lateral de tu caja. Toque **'Confirm.'**

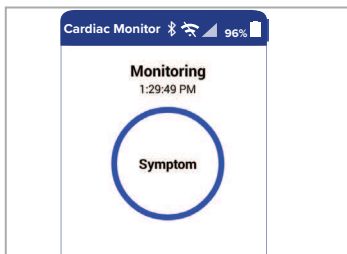

- 4 Su procedimiento se está ejecutando cuando aparece el botón de Symptom.

Una vez que el dispositivo móvil se haya encendido y conectado a la unidad de control, la luz AZUL de la unidad de control parpadeará lentamente, lo cual indica que la unidad de control está realizando el monitoreo y está comunicada con el dispositivo móvil de forma correcta.

# Guía de luz y sonido



Luz intermitente




Encendido



Apagado




Monitoreando: Bien

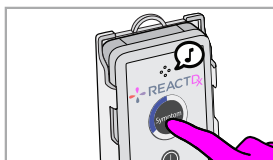

Activación del botón  
"Symptom"



Verifique unidad de control

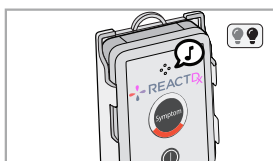

Cambie la batería

**AZUL**

**Luz intermitente**

Monitoreando correctamente y hay comunicación con el dispositivo móvil.

**VERDE**

**Luz intermitente**

Monitoreando correctamente, pero no hay comunicación con el dispositivo móvil.

**NARANJA**

**Luz intermitente**

Cambie la batería.

# Cambio de los electrodos

---



Cambie los electrodos cada dos días.

▶ Asegúrese de limpiar y preparar la piel antes de aplicar nuevos electrodos.



▶ Cuando vuelva a colocarlos, **desplace un poco su ubicación** en su tórax para reducir la irritación cutánea.

▶ **Revise el diagrama de ubicación** (en la página 5) para colocar correctamente las terminales de colores del cable del paciente.

## Al dormir

---

**Coloque el soporte para cable con la unidad de control a su lado** con los cables extendidos tanto como sea posible de manera que no se dé vuelta el monitor.



**Use una prenda de dormir con un bolsillo a la altura del pecho** y coloque el monitor en el bolsillo.

**!** **NO** use el cordón alrededor del cuello al dormir.

# Cambio y carga de la batería

 Luz Intermitente




Batería cargada y monitoreando.




Batería baja.



**1** Apague el aparato.

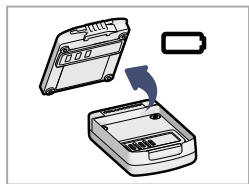


**2** Extraiga la batería de la unidad.

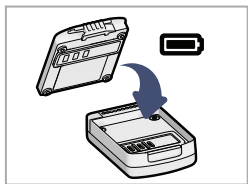


**3** Coloque la batería en la unidad.




**4** Inserte la unidad asegúrese de que esté encendida.

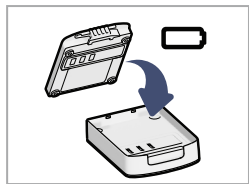

**5** Coloque la batería en el cargador.

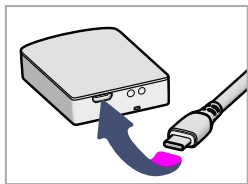


**6** Conecte el cable al cargador y a un tomacorriente.

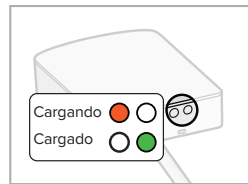

**7** Verifique las luces.


# Registro de síntomas

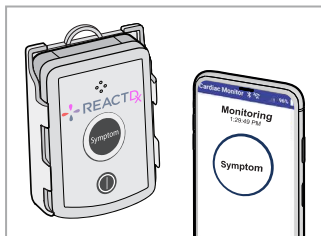


- 1 Cuando perciba un síntoma, presione el botón **“Symptom”** en la unidad o en el dispositivo móvil.



- 2 Presione la opción **“Manual”** o **“Audio”** para registrar los datos del síntoma.

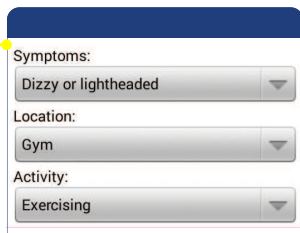


Toque la opción **“Manual”** y, de los tres menús desplegables, seleccione sus síntomas, ubicación y actividad. Para terminar presione **“Save”**.

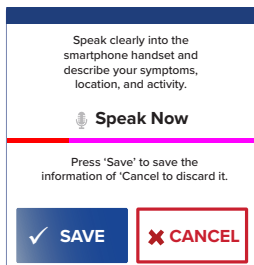


Toque la opción **“Audio”** y hable con claridad al micrófono del dispositivo móvil y describa sus síntomas, ubicación y actividad. Toque la opción **“Done”**

- ! **Recuerde:** Cada vez que perciba un síntoma, presione el botón **“Symptom”** que se encuentra en la **unidad de control** o el **dispositivo móvil**, y registre qué sentía y qué estaba haciendo.

# Conexión del monitor a una red wi-fi

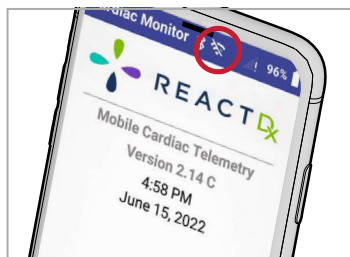


**1** Toque el **símbolo wi-fi** en la parte superior de la pantalla de inicio.

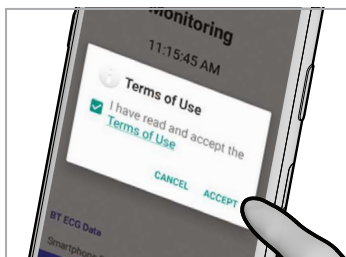

**2** Lea y acepte los términos de uso.



**3** Seleccione su red.

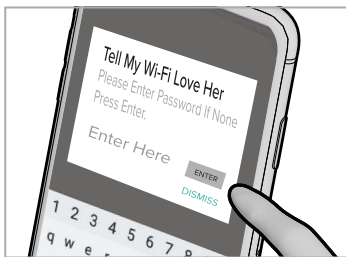

**4** Ingrese su contraseña, Presione **ENTER**, and verifique su conexión.

**!** Su monitor cardíaco se conectará automáticamente a una red celular. Sin embargo, si elige conectar su monitor a una red wi-fi, eso ayudará a que los datos recopilados se transmitan con rapidez a nuestros centros de monitoreo cardíaco.

# Qué hacer y qué no hacer



**Cambie los electrodos cada dos días.**




**Utilice en el día y la noche.**


**NO** se duche, bañe ni nade con el dispositivo móvil, soporte para cable, unidad de control ni el cable del paciente, ni los humedezca de ninguna otra forma.



Insértelo completamente en el soporte para cable.

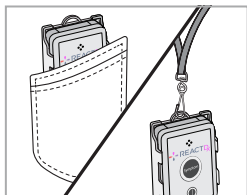


Lleve el soporte para cables en un cordón o en un bolsillo.

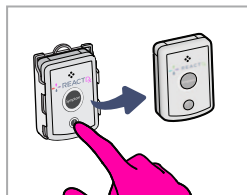

Apáguelo antes de cambiar la batería.




Mantenga el dispositivo móvil cerca.

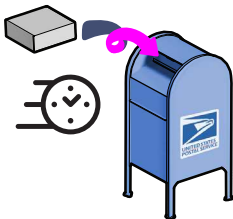


*Devuélvalo sin demora: deje el kit en cualquier buzón de USPS para que el cartero lo recoja.*

# Resolución de problemas


Los mensajes de texto con un ícono amarillo de precaución en el teléfono son Mensajes de Acción que requieren tu atención. Sigue estas simples instrucciones para volver a la monitorización completa.

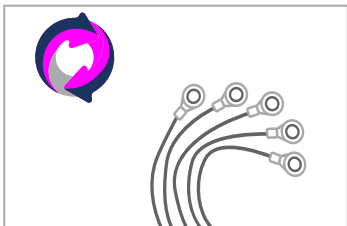

- 1** Cambie los electrodos cada dos días.

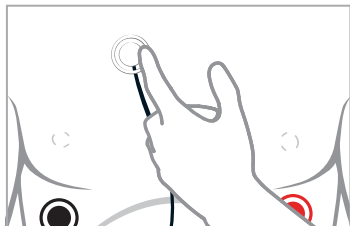


- 2** Asegúrese de que todos los electrodos estén bien colocados y que su colocación sea correcta.

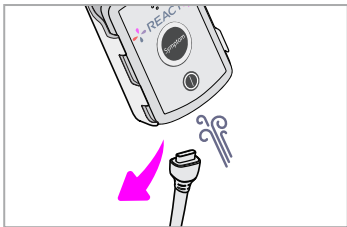


- 3** Desconecte el cable del soporte y sople en el puerto.



- 4** Vuelva a insertarlo y asegúrese de que el dispositivo móvil haya regresado al modo de monitoreo.

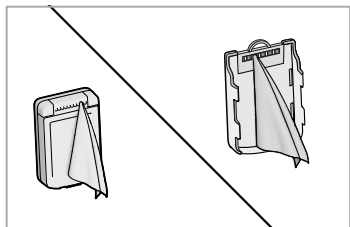


**5** Limpie el interior de la base y el exterior de la unidad de control con una toallita con alcohol.

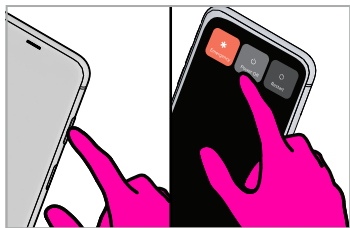


**7** Mantenga presionado el botón de encendido en el costado del dispositivo móvil. Toque Apagar.

**!** Si no puede resolver un problema o necesita ayuda con otros mensajes de error, llame a ReactDx al (877) 996-5553 o chatee con nosotros en línea en [www.ReactDx.com](http://www.ReactDx.com).

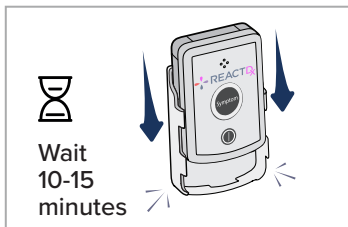


**6** Vuelva a insertarlo y asegúrese de que el dispositivo móvil haya regresado al modo de monitoreo.

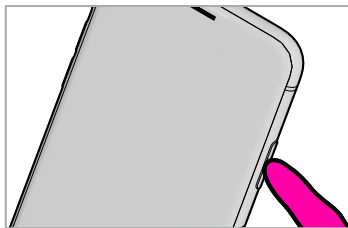


**8** Encienda el dispositivo móvil.

## Para finalizar el procedimiento


---

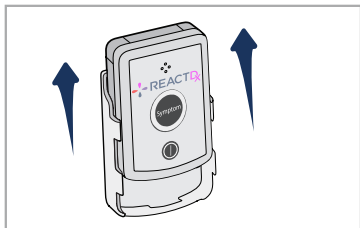


**1** Retire la unidad de control de la base.

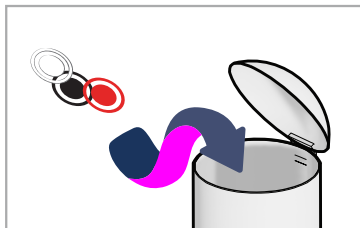

**2** Desconecte el cable del paciente de los terminales y deseche los electrodos.

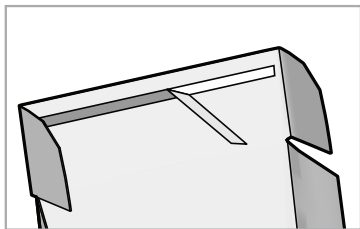

**3** Vuelva a colocar todo el contenido o los suministros no utilizados en la caja.  
Cierre y selle la caja.

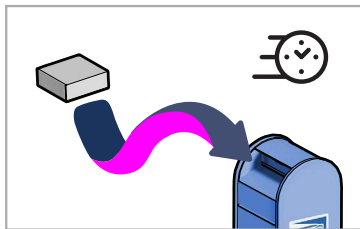


**4** Déjelo inmediatamente al cartero en cualquier buzón de USPS.

---

**Recuerde devolver el kit inmediatamente después de finalizar el procedimiento para ayudar a su médico a terminar la prueba. Los dispositivos no devueltos pueden generar una factura de hasta \$2000 para reemplazar el dispositivo.**

## **Lista de embalaje del kit:**


- Colgante universal
- Dispositivo móvil
- Baterías
- Soporte para cable
- Cable de 3 o 5 derivaciones
- Cargador de la batería
- Cable de carga y enchufe
- Electrodo sin usar
- Acollador

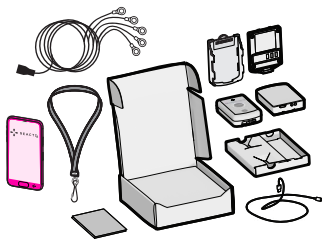

# Devolución del Kit de Monitoreo

Devuelva el kit de inmediato de manera que su doctor pueda finalizar su estudio. Los dispositivos no devueltos podrían retrasar la entrega a su doctor, generar una factura por los equipos no devueltos, y demorar la ayuda a los pacientes siguientes.

Déjelo para el cartero en cualquier buzón de USPS.

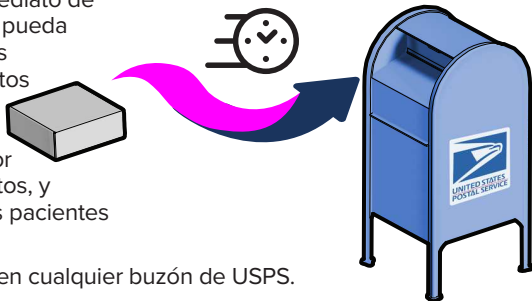

Por favor, tómese un momento para completar la encuesta en [www.ReactDx.com/survey/](http://www.ReactDx.com/survey/). Sus comentarios nos ayudarán a brindarles a pacientes como usted la mejor experiencia posible.



Medicomp, Inc. dba ReactDx ha obtenido el Sello de Aprobación Dorado de la Joint Commission.



(877) 996-5553 • [www.ReactDx.com](http://www.ReactDx.com) • [Info@ReactDx.com](mailto:Info@ReactDx.com)

©2024 Medicomp, Inc. dba ReactDx

QSGSPR0720-02